



Innovation without boundaries



# LiNA AntiFog Solution™

*Verhindert das Beschlagen der Kameraoptik  
bei endoskopischen Eingriffen*





# LiNA AntiFog Solution™

Das Anti-Beschlag-Konzept von LiNA Medical setzt sich zusammen aus LiNA Elfred, LiNA Clear Sight und LiNA Clear Sight Reinigungstüchern.

## funktionell

- **LiNA Elfred**

LiNA Elfred ist ein kleiner Schwamm, der in einem Aluminiumbehälter mit haftfähigem Boden eingeschweißt ist. Der Schwamm ist mit 6 ml Anti-Beschlag-Lösung getränkt. LiNA Elfred ist ohne langwierige Vorbereitungen sofort und einfach anwendbar und bietet somit höchsten Anwenderkomfort:

- 1) Abdeckfolie vom Boden des Behälters abziehen und Behälter am Abdecktuch oder Instrumententisch festkleben.
- 2) Deckelfolie vom Behälter abziehen.
- 3) Endoskop auf den Schwamm drücken und drehen, um eine dünne Schicht der Anti-Beschlag-Lösung aufzutragen.
- 4) Falls erforderlich kann der Schwamm aus dem Behälter entnommen werden, um die Seiten des Endoskops zu reinigen.

LiNA Elfred ist mit und ohne Alkohol erhältlich.

- **LiNA Clear Sight**

LiNA Clear Sight ist ein Satz aus einem 6-ml-Fläschchen und einem Schwamm mit haftfähiger Rückseite. Clear Sight ist einfach anwendbar:

- 1) Schwamm am Abdecktuch oder Instrumententisch festkleben.
- 2) Fläschchen öffnen und die Lösung auf den Schwamm gießen.
- 3) Endoskop auf den Schwamm drücken und drehen, um eine dünne Schicht der Anti-Beschlag-Lösung aufzutragen.

LiNA Clear Sight ist mit und ohne Alkohol erhältlich.

- **LiNA Clear Sight Reinigungstücher**

LiNA Clear Sight Reinigungstücher sind mit einer Anti-Beschlag-Lösung getränkt und einzeln in Peel-Beuteln verpackt. LiNA Clear Sight Reinigungstücher sind nur ohne Alkohol erhältlich.



### Bestellinformationen:

LiNA AntiFog Solution **CE 0459**

REF.	Produkt	Lieferform
CS-20	<b>LiNA Elfred</b> - Standardausführung, Einweg-Artikel	30 Stück pro Karton, steril
CS-20A	<b>LiNA Elfred</b> - mit 4 % Alkohol, Einweg-Artikel	30 Stück pro Karton, steril
CS-30	<b>LiNA Clear Sight</b> - Standardausführung, Einweg-Artikel	20 Stück pro Karton, steril
CS-30A	<b>LiNA Clear Sight</b> - mit 4 % Alkohol, Einweg-Artikel	20 Stück pro Karton, steril
CS-40	<b>LiNA Clear Sight Reinigungstücher</b> - Standardausführung, Einweg-Artikel	30 Stück pro Karton, steril

